



Návod k použití (CZ)

- matrace vzduchová s kompresorem

Matrace vzduchová s kompresorem

MED AIR WAVE






Distributor v ČR:

PATRON Bohemia a.s.
Českolipská 3419
CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
tel.: +420-315 630 111
fax.: +420-315 630 199
reha.cz@patron.eu
www.patron.eu

Výrobce:

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
88316 Isny/Allgäu

SCHEMA - POPIS

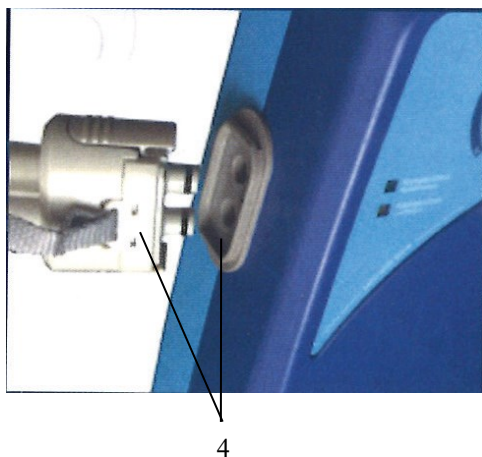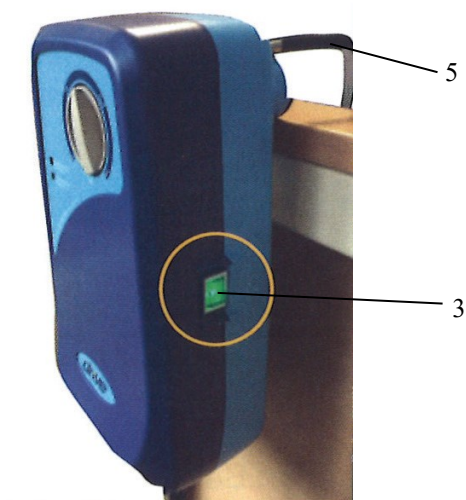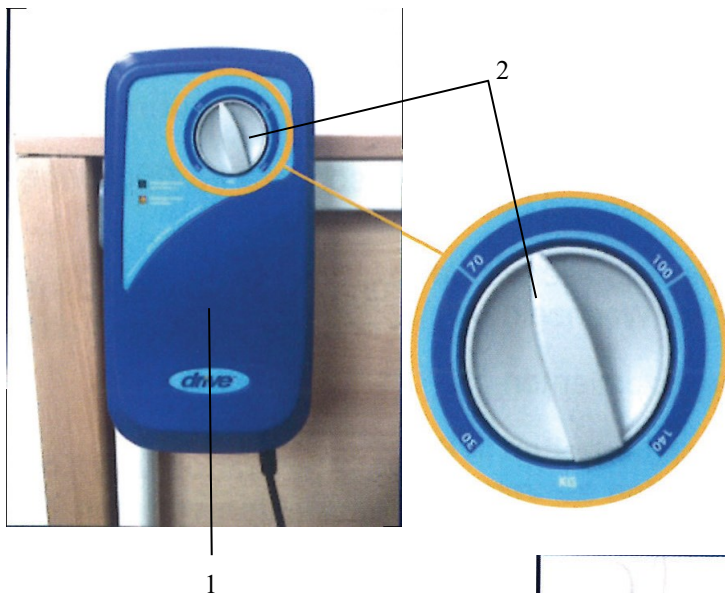

Přední část

1. Přední panel
2. Regulátor tlaku / hmotnosti uživatele
3. Hlavní vypínač 1/0 (zelená kontrolka)
Na boční straně

Zadní část

4. Připojení kompresoru k matraci
5. Háčky k zavěšení

Matrace

6. Pro rychlé odsávání vytáhněte červenou šňůrku s tlakem CPR



Antidekubitní vzduchová matrace MED AIR WAVE

Antidekubitní vzduchová matrace MED AIR WAVE je určena výhradně pro použití s Drive Med Air Wave kompresorem.

Systém je založen na střídání tlaku v jednotlivých komůrkách matrace.

Tim je pacient střídavě podpírán na různých částech těla, což zamezuje vzniku dekubitů.

Návod k instalaci:

- 1) Kompresor umístěte na pevný rovný povrch nebo zavěste pomocí vyklápěcích úchyťů (spodní část přístroje) na konstrukci postele v místě nohou pacienta.
- 2) Položte matraci na postel (přes klasickou matraci) tak, aby vstupní trubičky pro připojení vzduchu byly v „nohách“ postele. Volné konce vzduchové matrace zasuňte pod klasickou matraci.
- 3) Propojte gumovými hadičkami přístroj a matraci. **Zkontrolujte, zda nejsou hadičky přehnuté nebo zauzlované.**
- 4) Zapojte kompresor do elektrické sítě.
- 5) Pro rychlé odsávání matrace zatáhněte za červenou šňůrku s tlakem CPR dolů (viz obrázek 6) Boční, jako hadicový systém. Otevřené ventily a vzduch uniká ze všech buněk. Chcete-li systém doplnit, zavřete jej, ventil CPR opět pevně zatlačte a odpojte, znovu vložte šňůrku označenou CPR.
- 6) Dále se řiďte návodem k obsluze kompresoru.

Nosnost: matrace - max. 140kg

Upozornění !

- 1) Nepoužívat matraci blízko otevřeného ohně
- 2) Zákaz kouření v blízkosti matrace a kompresoru
- 3) Zákaz používání hořlavých anestetik
- 4) V blízkosti matrace nesmí být ostré předměty
- 5) Použitím prostěradla zamezte přímému styku matrace s pokožkou pacienta

Skladování:

Skladujte při teplotách 0-50°C. Pokud byla matrace v prostředí s teplotou nižší než 0°C, ponechte ji před použitím nejméně 60 minut při pokojové teplotě. Před uložením ke skladování matraci vyfoukněte, srolujte od nohou směrem k hlavě.

Provozujte při teplotách 10-40°C.

Servis:

Při jakékoliv závadě se obračte na prodejce, který vám komplet dodal.

Čištění:

NESTERILIZUJTE V AUTOKLÁVU. Použijte pro čištění mýdlo, vodu a roztok vhodný pro dezinfekci. Nechte volně oschnout, nesusušte na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Kompresor k antidekubitní vzduchové matraci MED AIR WAVE

Kompresor je určen výhradně pro použití s antidekubitní vzduchovou matrací MED AIR WAVE. Systém je založen na střídání tlaku v jednotlivých komůrkách matrace pomocí kompresoru. Tím je pacient střídavě podpirán na různých částech těla, což zamezuje vzniku dekubitů.

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE

Bezpečnostní upozornění !

- Dodržujte správné používání a údržbu výrobku pro předejití poškození nebo ublížení na zdraví.
- V blízkosti matrace a kompresoru NEKURTE.
- Nepoužívejte v blízkosti kompresoru hořlavá anestetika, která se vypařují do okolí.
- Po používání vždy odpojte kompresor od zásuvky.
- Nepoužívejte při koupeli.
- Nepoužívejte nebo neskladujte výrobek na místě odkud by mohl spadnout do vany či umyvadla apod.
- Nevkládejte do vody či jiné kapaliny
- Nesahejte na výrobek pokud spadne do vody. Vždy jej nejdříve odpojte.
- Kompresor by nikdy neměl být ponechán bez dozoru, když je zapojen do elektrické sítě.
- Zvýšená opatrnost je nutná při používání dětmi nebo invalidy, nebo v jejich blízkosti.
- Používejte pouze podle návodu a nepoužívejte přípravky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte, když je porušený kabel nebo zástrčka, při špatné funkčnosti nebo při poškození. Vraťte výrobek do servisu k prozkoumání.
- Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Nikdy neblokuje vzduchové otvory nebo je nepokládejte na měkký povrch, jako je postel, kde by otvory mohly být ucpany. Udržujte otvory v čistotě.

Instalace a provoz:

- 1) Kompresor umístěte na pevný rovný povrch nebo zavěste pomocí vyklápěcích háčků (5) na konstrukci postele v místě nohou pacienta.
- 2) Položte matraci na postel (přes klasickou matraci) tak, aby vstupní trubičky pro připojení vzduchu byly v „nohách“ postele. Volné konce vzduchové matrace zasuňte pod klasickou matraci.
- 3) Propojte gumovými hadičkami přístroj a matraci. **Zkontrolujte, zda nejsou hadičky přehnuté nebo zauszované.**
- 4) Zapojte kompresor do elektrické sítě.
- 5) Hlavní vypínač (3) zapněte do polohy „1“. Rozsvícená zelená kontrolka signalizuje zapnutý chod.
- 6) Nastavte požadovaný tlak dle váhy pacienta regulátorem tlaku (2). Kompresor je třeba nechat stále v síti i po nafouknutí matrace. Jednotlivé komůrky se střídavě nafukují (pulsují). Tím se střídá tlak na různých částech těla a je zamezeno vzniku proleženin u pacienta.
- 7) Tlak vzduchu v matraci nastavte otočným kolečkem na stupnici od 30 kg do 140 kg dle hmotnosti pacienta (2). Kontrolka nízkého tlaku (2) bude svítit dokud nebude požadovaný tlak dosažen.

(Nosnost: max. 140 kg)

**Varování: Kompresor smí být použit pouze s matrací doporučenou výrobcem!
Nepoužívejte nikdy za jiným účelem než je určeno výrobcem.**

Pokud se vyskytne problém:

Nejde zapnout - zkontrolujte elektrické připojení, zkontrolujte pojistky.

Pacient se propadá - nastavení tlaku neodpovídá hmotnosti pacienta, nastavte vyšší stupeň a počkejte pár minut. Z kompresoru nevychází žádný vzduch - běžný jev při střídavém módu, vzduch vychází v pravidelných intervalech.

V opakovaném cyklu se matrace chová jako by neopakovala - počkejte na dokončení cyklu. Zkontrolujte vzduchové vedení v matraci

Jestli zde vaše dotazy nejsou zodpovězeny, mohlo by se jednat o závažnější problém. Kontaktujte prodejce.

Servis:

Při jakémkoliv závadě se obračejte na prodejce, který vám komplet dodal.

Skladování:

Skladujte kompresor při pokojové teplotě. Před uložením ke skladování kompresor vypojte z elektrické sítě.

Provozujte při teplotách 10-40°C.

Čištění a údržba:

Kompresor otírejte pouze vlhkým hadříkem. Používejte méně agresivní čisticí prostředky.

Nikdy ho neponožujte do vody!

Udržujte kompresor v bezprašném prostředí.

Kontrolujte kabel a zástrčku jestli nejsou poškozené.

Kontrolujte průchod vzduchu u ventilů.

Kontrolujte vzduchové hadice zda nejsou překroucené nebo prasklé.

Pro výměnu kontaktujte prodejce.

SCHEMA– POPIS:

1. Čelní panel
2. Regulátor tlaku / hmotnosti uživatele
3. Zelená kontrolka Hlavní vypínač ON/OFF)
4. Připojení kompresoru k matraci
5. Háčky k zavěšení (např.: na postel)
6. Pro rychlé odsávání vytáhněte červenou šňůrku s tlakem CPR

IDENTIFIKAČNÍ LIST

Identifikační štítek / Typ výrobku (napíšte):

Závěrečná kontrola:

Podpis:

CZ

Podmínky užití:

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacce se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění práva z vady musí uživatel nepochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacce se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce neodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Uplatnění práva z vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, zejména na znečištění, opotřebení, či poškození potahu, plastových dílů, opotřebení brzd, opotřebení dezénu či defektu pneumatik. Uplatnění práva z vady také pozbývá platnosti, byly-li závady způsobeny nedovoleným přetěžováním, nehodou, mechanickým poškozením, násilím nebo neodborným zásahem do výrobku či neodborným zacházením s ním.
10. Technické řešení podvozku nezaručuje ideální vedení stopy, proto tato skutečnost nemůže být předmětem reklamacce.
11. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

Datum prodeje (den, měsíc, rok):

Jméno (hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce: